



Žaizdų plovimo tirpalas lėtinėms odos žaizdoms valyti ir drėkinti.

octenilin® žaizdų plovimo tirpalas

Privalumai

- Puikios valomosios savybės
- Itin gerai toleruojamas odos ir audinių
- Tinka bet kokios kilmės žaizdoms
- Daugkartiniam ir ilgalaikiam naudojimui
- Sterilus

Taikymo sritys

- Greitas ir veiksmingas žaizdų valymas
- Žaizdų apnašoms, sudarytoms iš nekrozinio audinio, patogenų, bioplėvelės ir fibrininės plėvelės, šalinti
- Tinka sunkiai prieinamoms vietoms, pavyzdžiui įtrūkimams ir gilioms žaizdų ertmėms
- Žaizdoms drėkinti ir sudrėkinti
- Tvarsčiams ir žaizdų tamponams sudrėkinti
- Sunkiai nuimamiems, prie žaizdos prilipusiems tvarsčiams ir (arba) žaizdų tamponams, lengvai pašalinti
- Tinka naudoti taikant neigiamo slėgio žaizdų terapiją (V. A. C. Ulta, KCI)

Produkto informacija

Drėkinamosios savybės

Dėl mažo paviršiaus įtempimo, **octenilin®** žaizdų plovimo tirpalas pasižymi puikiomis drėkinančiomis savybėmis, puikiai valo audinių paviršius, net ir sunkiai pasiekiamus paviršius, pvz., įtrūkimus ir galias žaizdų ertmes.

Valomoji geba pašalinant bioplėveles

Valomosios gebos pašalinant bioplėvelėje esančius mikroorganizmus studijos atskleidė gerus rezultatus. Palyginti su ligininėse įprastai naudojamais žaizdų plovimo tirpalais, tokiais kaip Ringerio arba izotoniniu fiziologiniu tirpalu, **octenilin®** žaizdų plovimo tirpalas pasižymi kur kas geresne valomąja geba, todėl veiksmingiau mažina patogenų kiekį.

Konservavimas

octenilin® žaizdų plovimo tirpalas yra konservuotas taip, kad naudojant žymiai sumažintų mikroorganizmų patekimo į gretimą aplinką riziką. Todėl naudojamas pagal instrukcijas **octenilin®** žaizdų plovimo tirpalas veiksmingai užtikrina barjerą nuo mikroorganizmų tarp žaizdos ir gydomo asmens. **Audinių toleravimas ir biologinis suderinamumas**
Nedirgina, nejautrina, nesukelia skausmo, toksiškai neveikia audinių, netrikdo granuliacijos ir epitelizacijos procesų. Geras oktenidino toleravimas patvirtintas ilgamete klinikoje patirtimi ir lėtinų žaizdų klinikiniais tyrimais.

Naudojimo instrukcija

Kiekvieną kartą keisdami tvarstį, gerai sudrėkinkite ir išvalykite žaizdą **octenilin®** žaizdų plovimo tirpalu (**octenilin®** žaizdų plovimo tirpalą prieš pat naudojimą galima pašildyti iki kūno temperatūros). Šiuo būdu galima lengvai nuimti nesunkiai nuimamas žaizdų tvarstymo priemones. Tvarsčiai ir žaizdų tamponai, papildomai išmirkyti **octenilin®** žaizdų plovimo tirpale, gali būti naudojami fibrino sluoksniui ištirpinti. Procedūra kartojama tol, kol bus pašalintos visos apnašos ir nekrozinis audinys, o žaizda bus vizualiai švari. Po to nuplauti įprastai nėra būtina. Jei reikia, žaizdą galima toliau gydyti **octenilin®** žaizdų geliu.

Geriausias iki 8 savaičių po pirmojo naudojimo.

CE 0297



octenilin® žaizdų plovimo tirpalas

Produkto duomenys

Sudedamosios dalys

Labai išgrynintas vanduo, glicerolis, etilheksilglicerinas, oktenidino HCl.

Pirminė būklė

Sterilus, užsandarintas. Stabilus kambario temperatūroje, žr. laikymo sąlygų informaciją.

Tinkamumo laikas

8 savaitės nuo pirmojo atidarymo. Po kiekvieno naudojimo buteliuką reikia užsukti.

Fizikinės ir cheminės savybės

Spalva	bespalvė
Tankis	apie 1,0 g/cm ³ / 20 °C
Pliūpsnio temperatūra	netaikoma
Forma	skystis
pH	apie 5,4 / 20 °C
Dinaminė klampa	neturima duomenų

Specialieji nurodymai

Vadovautis nuimant prie žaizdos prilipusius tvarščius, t. y. sunkiai nuimamus tvarščius

Jei žaizdos tvarstį sunku nuimti, rekomenduojama jį suvilgyti **octenilin®** žaizdų plovimo tirpalu, kad būtų lengviau nuimti tvarstį netraumuojant žaizdos paviršiaus.

Šalutinis poveikis

Nepastebėta.

Kontraindikacijos

octenilin® žaizdų plovimo tirpalo negalima naudoti pacientams, kuriems yra žinoma arba įtariama alergija vienai ar kelioms sudedamosioms medžiagoms. Abejojant kreiptis į gydytoją. **octenilin®** žaizdų plovimo tirpalo negalima naudoti ant hialinių kremzlių, akių, ausų, nosies, šlapimo pūslės ir pilvo ertmėje! Siekiant išvengti galimo audinių pažeidimo, produkto negalima švirkšti ar dėti ant audinių spaudžiant. Turi būti užtikrintas tinkamas drenavimas iš žaizdų ertmių (pvz., naudojant lankstų drenavimo vamzdelį).

Bendrieji saugos nurodymai

- Nenaudoti infuzijoms ir injekcijoms!
- Neskirtas vartoti ber burną!
- Naudoti tik žaizdų išorėje.
- Turi būti naudojama tik kokybiška ir nepažeista tara.
- Naudoti tik nepažeistas ir nesugadintas pakuotes. Saugoti produktą nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.
- Kad naudojant **octenilin®** žaizdų plovimo tirpalą į žaizdą nepatektų bakterijų, užtikrinti, kad pakuotė nesiliestų su žaizda.
- Medicinos priemonė - laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!

Užsakymo informacija

Prekė	Pristatymo forma	Prekės Nr.
octenilin žaizdų plovimo tirpalas 350 ml buteliukas	10 vnt. dėžutėje	Paprašius

Šie produktai parduodami ne visose šalyse. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su vietos dukterine įmone ar platintojais.

Susiję produktai

- **octenilin®** žaizdų gelis

Aplinkosauginė informacija

schülke produktus gamina ekonomiškų būdų ir taikydama modernius, saugius bei aplinkai nekenkmingus gamybos procesus, tuo pačiu užtikrindama, kad produktai atitinka aukštus kokybės standartus.

Specialistų nuomonė ir informacija

Norėdami peržiūrėti visus pasiekiamus literatūros šaltinius ar ataskaitas, susijusias su produktu, apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.schuelke.com. Konkrečiais klausimais kreipkitės klientų aptarnavimo telefonu +49 40 52100-666, el. paštu info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH gamybos leidimas suteiktas vadovaujantis Vokietijos Vaistų įstatymo 13 skirsnio 1 dalimi ir GMP atitikties sertifikatais, taikomais vaistams.



schülke pagrindinė buveinė
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Vokietija
Telefonas +49 40 - 52100 - 0
Faksas +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Igaliotasis atstovas Lietuvoje
„Sanovus“, UAB
Daugėlišio g. 32-301
LT-09300 Vilnius
Telefonas +370 5 2450 415
Faksas +370 5 2706 201
info@sanovus.lt