



Terapiniu požiūriu veiksmingas žaizdų gydymas ir prevencija

## schülke kempinėlės žaizdoms

### Privalumai

- Galima naudoti kartu su **octenilin**® žaizdų plovimo tirpalu
- Aplink sąlyčio su žaizda sritį stimuliuojama kraujotaka
- Skatinamas granuliacinio audinio formavimasis
- Pritaikoma pagal individualų poreikį dėl skirtingų tekstūrų ir paviršių
- Mažina mikroorganizmų kiekį, valo žaizdą, skatina gijimą

### Taikymo sritys

**schülke** kempinėlės žaizdoms yra veiksmingos gydant:

- ūmines ir lėtines žaizdas;
- pooperacines žaizdas;
- didelio ploto odos nudegimus.

### Naudojimo instrukcija

**schülke** kempinėlės žaizdoms gali reikšmingai sumažinti žaizdų atsiradimo riziką dėl prastos kraujotakos.

Naudojant šias kempinėles galima sumažinti arba pašalinti dėl prastos kraujotakos atsiradusius žaizdų gijimo sutrikimus, taip pat išvalyti infekuotas žaizdas, dažniausiai nesiimant jokių papildomų veiksmų. Kempinėlės žaizdoms skatina granuliacijos ir epitelizacijos procesą, o pageidaujami rezultatai dažnai pasiekiami greitai.

Žaizdos išvalymas yra pagrindinė žaizdų priežiūros proceso dalis, kurios tikslas – sudaryti palankias sąlygas žaizdos viduje ir jos pakraščiuose.

Aplink sąlyčio su žaizda sritį stimuliuojama kraujotaka, o tai skatina natūralias organizmo gijimo reakcijas į užterštas ar infekuotas žaizdas. Taip skatinamas granuliacinio audinio formavimasis. Raudonos, mėlynos ir baltos spalvos **schülke** kempinėles žaizdoms galima derinti.

**schülke** kempinėlės žaizdoms turėtų būti naudojamos prižiūrint apmokytam klinikos personalui atsižvelgiant į individualius reikalavimus.

**schülke** kempinėlės žaizdoms skirtos vienkartiniam naudojimui ir paprastai dedamos tiesiai ant žaizdos arba į žaizdą, neatliekant jokių papildomų veiksmų (pvz., nenaudojant jokių tepalų, drėkinimo ir pan.). Papildomos priemonės gali turėti neigiamos įtakos rezultatui. Galima naudoti kartu su **octenilin**® žaizdų plovimo tirpalu.

Naudojant **schülke** kempinėles žaizdoms, žaizdas galima valyti arba uždengti.

CE 0197



# schülke kempinėlės žaizdoms

## Produkto duomenys

**schülke** kempinėlės žaizdoms yra elastingos, pagamintos iš poliuretano (PUR), pasižymi grubia tekstūra ir šiurkščiu paviršiumi. **schülke** kempinėlės žaizdoms naudojamos žaizdoms gydyti ir prižiūrėti, kai reikia tvirtos, elastingos medžiagos, pasižyminčios dideliu laidumu orui ir skysčiams. Skirtingų spalvų kempinėlės žaizdoms skiriasi savo tekstūra ir laidumo orui bei skysčiui lygiu:

- raudonos spalvos: grublėta tekstūra, šiurkštus paviršius, didelis laidumas skysčiams;
- mėlynos spalvos: vidutinio grublėtumo tekstūra, šiurkštus paviršius, didelis laidumas skysčiams;
- balta spalva: negrublėta tekstūra, lygus paviršius, mažas laidumas skysčiams.

## Specialieji nurodymai

**schülke** kempinėlės žaizdoms:

- yra vienkartinio naudojimo ir sterilios, kol pakuotė išlieka nepažeista;
- negali būti pakartotinai naudojamos ar sterilizuojamos;
- negali tiesiogiai liestis su gleivine ar vidaus organais.

Žaizdos, kurios anksčiau buvo prastai aprūpintos krauju, gali būti labai skausmingos. Daugeliu atvejų skausmas sumažėja po keleto valandų, o sunkiais atvejais – per keletą dienų.

Gamintojas:

LIGAMED® medical Produkte GmbH

Pfannenstielstr. 2 | D - 90556 Cadolzburg, Vokietija

Tel. +49-(0)9103 / 20 46

info@ligamed.de

## Užsakymo informacija

| Prekė                                                                                      | Pristatymo forma              | Prekės Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>schülke</b> kempinėlės žaizdoms (mėlynos, raudonos ir baltos spalvos), 12 vnt. dėžutėje | 54 vnt. kartoninėje dėžutėje  | Paprašius  |
| <b>schülke</b> kempinėlės žaizdoms (mėlynos spalvos), 10 vnt. dėžutėje                     | 102 vnt. kartoninėje dėžutėje | Paprašius  |

Šie produktai parduodami ne visose šalyse. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekitė su vietos dukterine įmone ar platintojais.



**Schülke & Mayr GmbH** gamybos leidimas suteiktas vadovaujantis Vokietijos vaistų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir GGP atitiktis sertifikatais, taikomais vaistams.

**schülke pagrindinė buveinė**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Vokietija  
Tel. +49 40 - 52100 - 0  
Faks. +49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com



**Igaliotasis atstovas Lietuvoje**  
„Sanovus“, UAB  
Daugėlišio g. 32-301  
LT-09300 Vilnius  
Telefonas +370 5 2450 415  
Faksas +370 5 2706 201  
www.sanovus.lt  
info@sanovus.lt